

série/lote:



Válvula Unidirecional com PEEP

Indicação

Para o uso em Ventilador/Reanimador Manual. Para situações em que se necessite separar o ar da inspiração do ar da expiração, com ou sem a utilização da PEEP (0 a 20 cmH₂O).

Para uso exclusivo em Veterinária

Instruções de Uso


Certifique-se de que a conexão identificada como "PACIENTE" esteja conectada à máscara ou ao tubo do paciente e que a outra conexão esteja conectada ao equipamento (ventilador/reanimador).

Para ajustar a PEEP, gire o botão de controle até a pressão desejada (0 a 20 cmH₂O). Caso não se deseje PEEP (por exemplo, durante a Ressuscitação Cardiopulmonar - RCP), gire o botão de controle até a indicação ZERO.

Diferenciais

- Sem risco de reinalação
- Sem risco de fechamento da via expiratória (situação comum nas válvulas tipo *duckbill*)
- Em RCP, a pressão intrapulmonar não se eleva significativamente durante a compressão, em relação a pressão inspiratória. **É fundamental que nesta condição o ajuste da PEEP esteja em ZERO**


Instrução de Montagem

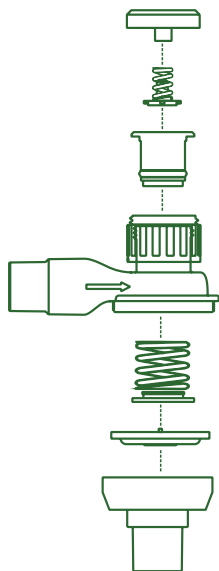

Conheça mais sobre a VUPPET. Acesse:
www.ventlogos.com

Contém 1 unidade
Ref.: VUPPET
Validade Indeterminada | Produto não estéril
Resp. Técnico: Flyner Stelzer Bada | CREA: ES-7451/D

Apresentação

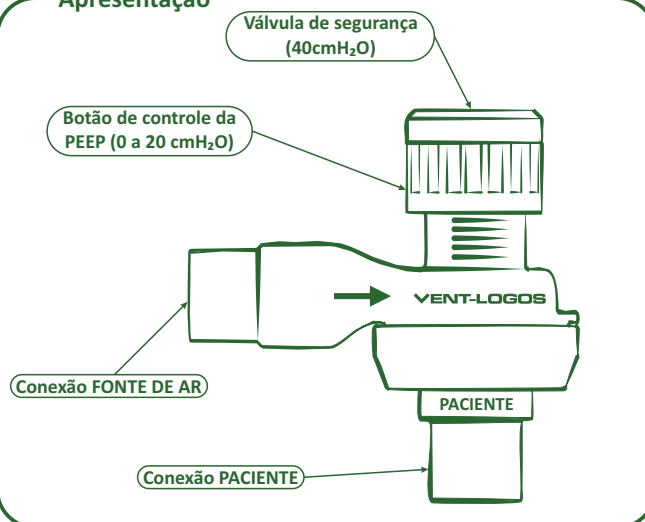

Advertências e Precauções

- Verificar se a válvula está limpa e esterilizada
- Armazenar em local seco e ao abrigo da luz
- Autoclavar em 121° C
- Recomenda-se substituir o **diafragma/cogumelo** a cada 30 ciclos de esterilização ou 6 meses de uso e sempre que necessário

Fabricado por: Vent-Logos Sistemas Lógicos Ltda.
Rua Edmundo de Oliveira, 39, Santa Luiza, Vitória, ES, Brasil
CEP: 29.045-224 | Tel.: +55 (27) 3225-6594 +55 (27) 3225-3052
Email: vendas@ventlogos.com